



**Инструкция  
по применению  
(введена впервые)**

**Лейкопластырь фиксирующий  
по ТУ 9393-004-01716953-2017**

производства Общества с ограниченной ответственностью «Бергус» (ООО «Бергус»),  
Россия, 601270, Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Боголюбово,  
ул. Ленина, д. 14, тел. 8-800-500-79-85, [sale@bergus.ru.com](mailto:sale@bergus.ru.com), [www.bergus24.ru](http://www.bergus24.ru)

**НАИМЕНОВАНИЕ:**

«Лейкопластырь фиксирующий» по ТУ 9393-004-01716953-2017

**Варианты исполнения:**

Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе

- белого цвета, размеры в см: 1x500, 2x500, 3x500, 4x500, 5x500;

- телесного цвета, размеры в см: 1,25x500, 2,5x500, 5x500.

Производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус» (ООО «Бергус»), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголобово, ул. Ленина, д.14.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначены для фиксации повязок или закрепления предметов медицинского назначения.

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:** Потребителями являются люди всех возрастных групп.**КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА:** Кратковременный, в отдельных случаях длительный контакт с неповрежденной кожей.**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Применяется для оказания помощи в лечебно-профилактических учреждениях, на производстве и в быту.**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

№	Наименование	Основа	Цвет основы	Клей	Размеры лейкопластыря
1	Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе	Тканевая	Белый	гипоаллергенный клей на основе синтетического каучука	1x500, 2x500, 3x500, 4x500, 5x500
			Телесный		1,25x500, 2,5x500, 5x500

Примечание: Допускаются отклонения от размеров, указанных на этикетке, не более 10 %

**СОСТАВ:** Тканевая основа, гипоаллергенный клей.**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Изделия используются при фиксации повязок или закрепления предметов медицинского назначения.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

**ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ**

Извлечь лейкопластырь фиксирующий из потребительской упаковки. Отрезать ножницами полосу необходимого размера.

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ**

Клейкой стороной наложить на повязку или на фиксируемое изделие. Края полосы прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.

**УСЛОВИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Лейкопластырь фиксирующий меняют по мере необходимости.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам изделия - прекратите использование лейкопластыря фиксирующего и обратитесь к врачу.

**ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Отсутствуют.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °С до 28 °С и влажности воздуха 60 - 80%.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Условия транспортирования в диапазоне температур от - 50 до + 50 °С и влажности воздуха 60 - 80%.

Транспортирование изделий следует проводить в закрытом транспорте в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед использованием изделий необходимо убедиться в том, что срок хранения изделия не закончился.

Изделия эксплуатируют при температуре от +10 °С до +35 °С и влажности воздуха 60 - 80%.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация изделий потребителями при самостоятельном использовании осуществляется обычным путем совместно с бытовыми отходами.

Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322.

Допускается утилизация отходов материалов на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Образующиеся отходы относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

Не подлежащие использованию лейкопластыри фиксирующие относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

#### **СРОК ГОДНОСТИ**

Гарантийный срок службы – 5 лет со дня изготовления.

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

ООО «Бергус», Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д.14.

бергус